



**8014 PRO / 8014 PRO+ /
8114 PRO+**

V 2024 – 1.0

QUICKSTART GUIDE

ALGEMEEN

De draadloze tafel / wand knop alarmeert wanneer iemand de rode toets dichtbij nadert of indrukt. De knop kan eenvoudig op tafel worden gebruikt of gemonteerd worden aan een ander oppervlakte (zie Zwanenhals handleiding). Om het vinden van de drukknop in het donker eenvoudiger te maken zal om de 2 sec. kortstondig de verlichting achter de rode knop zwak oplichten. Deze optie is uit te schakelen. De 8014 PRO kan worden gebruikt in combinatie met DAZA ontvangers en pagers. De 8014 PRO+ en 8114 PRO+ kan direct aan het verpleegoproepsysteem gekoppeld worden.

De batterij is reeds geplaatst, maar de knop staat standaard in de slaapstand. Door de rode toets een maal in te drukken zal de knop uit de slaapstand gebracht worden en een alarm uitzenden. Vanaf nu zal de oriëntatieverlichting om de 2 seconden licht zichtbaar zijn en ook de benaderingsfunctie is geactiveerd. Bij aanraking of benadering van de rode knop (+/- 1cm) zal deze alarmeren. Er zal een pieptoon klinken en de verlichting onder de rode toets licht fel op. De 8014 PRO moet worden ingeleerd op een ontvanger. Raadpleeg de handleiding van de ontvanger hoe dit te doen. Als de knop samen met een ontvanger geleverd wordt dan is deze waarschijnlijk reeds gekoppeld. De 8014 PRO+ alarmknop heeft een ingebouwde zender, niet compatible met Daza ontvangers. Raadpleeg uw leverancier voor aanwijzingen om de knop (zender) welke is ingebouwd te koppelen aan uw systeem.

UITSCHAKELEN

De alarmknop kan uitgeschakeld worden door de rode knop acht keer achter elkaar in te drukken. Het uitschakelen wordt bevestigd door een pieptoon.

Om de alarm knop in te schakelen dient de rode knop eenmaal ingedrukt te worden. Ook dit wordt bevestigd door een pieptoon en een alarm.

BATTERIJ VERVANGEN

De levensduur van de batterij is ongeveer 1,5 jaar. Wanneer deze bijna leeg is zullen bij het activeren van een alarm 3 zachte pieptonen klinken* i.p.v. 1 pieptoon. Ook knipperen de rode lampjes dan 3x. Tevens wordt een batterij leeg melding met het alarm meegezonden waardoor dit ook op de ontvanger te zien zal zijn (enkel bij de 8014 PRO). De oriëntatieverlichting knippert nu om de 4 seconden. Om de batterij te verwijderen kunt het beste de schroef verwijderen (zie figuur 2) en de printplaat uitnemen. Na het verwijderen van de batterij plaatst u de printplaat terug en zet u deze weer met het schroefje vast. Hierna plaatst u de nieuwe batterij, type CR123A. Let op de + en de – pool van de batterij zoals op de sticker staat vermeld. Het plaatsen gaat het makkelijkst door de min pool eerst op zijn plaats te zetten en dan de plus pool er voorzichtig in te drukken.

*** mits schakelaar 3 en 4 niet beide op OFF staan**

8014 PRO+ / 8114 PRO+ hebben geen DAZA zender ingebouwd. In deze variant is een zender ingebouwd die direct alarm geeft op het systeem dat in het huis aanwezig is. Wanneer er op het alarmsysteem een batterij leegmelding binnenkomt betekent dit dat de batterij van de zender leeg is, niet van de alarmknop. Laat deze zo spoedig mogelijk vervangen.

REINIGING EN DESINFECTIE

Het reinigen van DAZA-apparatuur is eenvoudig. Het is niet nodig de batterijen te verwijderen. Schakel het apparaat uit om te voorkomen dat u tijdens het schoonmaken een alarm veroorzaakt. Gebruik een vochtige doek. Wanneer het apparaat erg vies is moet de doek tussentijds schoongespoeld worden. Hierna kunt u het laten drogen aan de lucht of drogen met een schone doek.

De volgende stoffen kunt u veilig gebruiken:

- water
- desinfectiemiddelen, zoals chloor 1000 ppm en chloor 250 ppm
- alcohol 70%

Gebruik bij het schoonmaken zeker nooit:

- bleekmiddelen
- agressieve, bijtende schoonmaakmiddelen
- schoonmaakmiddelen die ammoniak of aceton bevatten
- zepige middelen. Dit kan sporen achterlaten.

Doe het middel van uw keuze op een doek zodat deze wat vochtig wordt. Spuit of giet het schoonmaakmiddel niet direct op de apparatuur. Op die manier kan vocht via de kiertjes van de behuizing naar binnen lopen. Dompel het product nooit onder, was het niet in een wasmachine en droog het niet in een droogtrommel. Door deze schoonmaakinstructie op te volgen blijft het apparaat in optimale conditie.

INSTELLINGEN

Diversen instelling zijn mogelijk. Daarvoor zal de behuizing van de knop geopend moeten worden.

De schakelaars zijn zeer klein. Gebruik bijvoorbeeld een speld om deze voorzichtig te verzetten.

Openen van de behuizing:

Verwijder de schroef uit de zijkant van de behuizing. Draai het deksel tot de aanslag en til het deksel op. (figuur 1)

Functie instellingen:

De 8014 PRO/8014 PRO+/8114 PRO+ heeft 8 dipswitches (zie figuur 2). Deze hebben de volgende functie instellingen:

Schakelaar	ON	OFF
1 Benaderingsfunctie	aan	uit
2 Oriëntatieverlichting	aan	uit

Schakelaar 3 en 4 bepaald het volume van de pieptoon.

Hoog volume	3 ON	4 ON
Midden volume	3 OFF	4 ON
Laag volume	3 ON	4 OFF
Buzzer uit	3 OFF	4 OFF

**Standaard staan alle schakelaars op ON (naar boven)*


Benaderingsfunctie:

Wanneer schakelaar 6 op OFF staat (naar beneden), heeft u 5 seconden de tijd om een eventueel per ongeluk geactiveerd alarm te annuleren. Als u voor deze optie hebt gekozen, zal het systeem gedurende deze periode 5 keer een geluidssignaal afgeven. Als u binnen die tijd de knop opnieuw benadert, wordt het alarm geannuleerd zonder dat er een draadloos signaal wordt verstuurd. Als de 5 seconden voorbij zijn zonder dat u de knop opnieuw benadert, wordt het draadloze alarm verzonden. Deze optie zorgt dus voor een korte vertraging voordat het alarm afgaat.


Sluiten van de behuizing:

Plaats het bovendeel met het streepje boven het gaatje van het onderste deel van de behuizing (zie figuur 3) en druk deze op elkaar. Draai daarna het bovendeel rechtsom tot de gaatjes weer tegenover elkaar zitten en plaats het schroefje terug.


Test het geheel op de juiste werking.

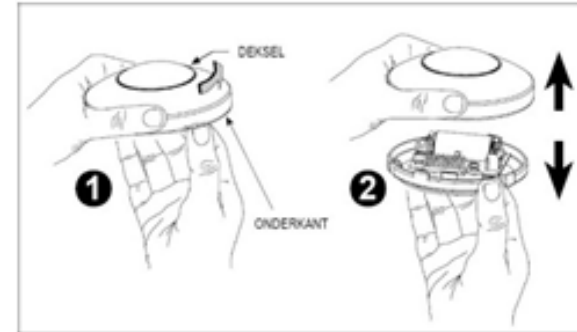

Figuur 1: Openen van de drukknop

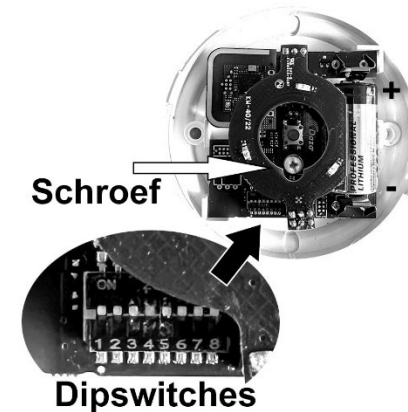

Figuur 2: Batterij plaatsing en Dipswitches

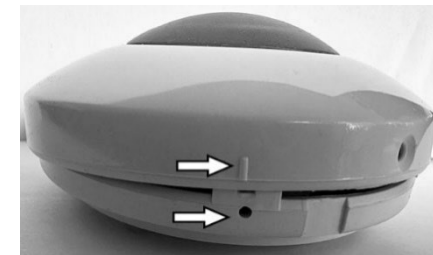

Figuur 3